

DST8000-Pro

Benutzerhandbuch - DST 8000 Pro Software



Die wissenschaftliche Methode, Schritt zu halten.

Version-06

Inhalt:	Seite
• Einführung.....	2
• Was kann der DST 8000-Pro für Sie und Ihre Patienten tun?.....	2
• Was ist der DST-Faktor?.....	3
• Bedienen des Bildschirms.....	3
• Verwenden der Software.....	5
• Erste Schritte.....	5
• Abschnitt A -- Die Erstinbetriebnahme und die Admin-Optionen	6
• Abschnitt B -- Benutzerhandbuch des Physiotherapeuten.....	11
• Zusätzliche Informationen.....	17
• Support.....	17

Einführung

Das DST 8000-Pro System überwacht, zeichnet und zeigt die Patientenleistung in den vergangenen und laufenden Behandlungen auf. Die aufgezeichneten Daten beinhalten die Behandlungsdaten, Treppenhöhe und die Auf- und Abstiegszeiten des Patienten. Mit einem Klick auf eine Schaltfläche wird eine Fortschrittstabelle eines Patienten erzeugt und angezeigt, einschließlich aller vergangenen Behandlungsdaten. Die Fortschrittstabelle wird dem medizinischen Personal zur Überprüfung und Auswertung per E-Mail zugesendet.

Das DST 8000-Pro System generiert ein einfach lesbares und objektives Dokument, das es den Physiotherapeuten, Patienten, Ärzten und Krankenkassen ermöglicht, den Treppengebrauch und die Gehfähigkeiten eines Patienten zu bewerten.

Das DST 8000-Pro System berechnet den "DST-Faktor" des Patienten, ein spezifischer Parameter, der bequem den aktuellen Status des Patienten zusammenfasst und das geschätzte Potenzial für zukünftige Verbesserungen.

Die medizinischen Einrichtungen und Fachkräfte des Gesundheitswesens gewinnen eine wertvolle Datenbank mit Tausenden von persönlichen Fortschrittstabellen, jeder enthält die angesammelten Daten des individuellen Fortschritts des Patienten, je nach Alter, Pathologie und Behandlungsdauer. Die Datenbank ist besonders vorteilhaft für Studien und die wissenschaftliche Forschung.

Was kann das DST 8000-Pro für Sie und Ihre Patienten tun?

1. Es stellt Informationen über die vorherigen Behandlungen des Patienten in grafischer Form vor jeder Behandlung dar.
2. Es zeigt die vergangenen Fortschritte Ihres Patienten und den aktuellen Status.
3. Es zeigt Ihnen, wie lange Ihr Patient braucht, die Treppen mit unterschiedlichen Höhen hinauf und hinab zu steigen.
4. Es verfolgt und zeichnet alle Treppensteigbehandlungen Ihres Patienten auf.
5. Es sendet die Fortschrittstabelle Ihres Patienten an Ihre E-Mail. Die Daten können ausgedruckt und bei professionellen Tagungen präsentiert werden.

Was ist der DSF-Faktor?

1. Der DST-Faktor ist ein Parameter, der vom DST 8000 - Pro generiert wird. Dieser Parameter, bestehend aus einer Nummer und einen Buchstaben, gibt Ihnen genaue Informationen über die derzeitige Treppensteigfähigkeit des Patienten, zusammen mit einer Prognose seiner/ihrer Verbesserungspotenziale.
2. Der DST-Faktor ist wie folgt gekennzeichnet: X-Y, wobei X eine Zahl zwischen 0 - 16 (0 - 6,5 beim Gebrauch von Zoll) ist und Y ist ein Buchstabe (A, B oder C). Die Zahl steht für die letzte gestiegene Treppenhöhe des Patienten und der Buchstabe bezeichnet die Geschwindigkeit des Fortschritts: A - der Patient hat bedeutende Fortschritte gemacht, B - der Patient hat bescheidene Fortschritte erzielt, und C - der Patient machte keine Fortschritte in den letzten 5 Behandlungen.
3. Der DST-Faktor wird auf der Basis der letzten 5 Behandlungen berechnet, d. h. der erste DST-Faktor wird auf der Fortschrittstabelle erst nach den ersten 5 Behandlungen angezeigt.
(2 für cm; 0,8 für Zoll)
4. Beispiel eines DST-Faktors: 13-A (Patient stieg eine Treppe von 13 cm und wird sich wahrscheinlich weiter verbessern)

Wie der DST-Faktor berechnet wird:

ΔH - die Änderung in Zentimetern (Zoll) zwischen der derzeitigen Treppenhöhe und der Höhe, die der Patient in den letzten 5 Behandlungen stieg.

ΔT - die Änderung in Sekunden zwischen der Zeit, die der Patient in der derzeitigen Behandlung und in den letzten 5 Behandlungen für das Treppensteigen brauchte.


Wenn $0 \geq \Delta H$	Dann ist der DST-Faktor:	(aktuelle Höhe) - C
Wenn $0 < \Delta H \leq 2$	Dann ist der DST-Faktor:	(aktuelle Höhe) - B
Wenn $2 > \Delta H$	Dann ist der DST-Faktor:	(aktuelle Höhe) - A
Wenn $0 = \Delta H$ und $\Delta T > 0$	Dann ist der DST-Faktor:	(aktuelle Höhe) - B

Bildschirmeinstellungen:

Wenn der Bildschirm 20 Minuten nicht gebraucht wird, verschwindet die Anzeige und der Satz **Tap to Start** erscheint auf dem Bildschirm. Die Software schaltet sich nach 5 Stunden ohne Gebrauch aus.


Bedienung des Bildschirms:

1. Sie können den Bildschirm drehen. Siehe die roten Pfeile.

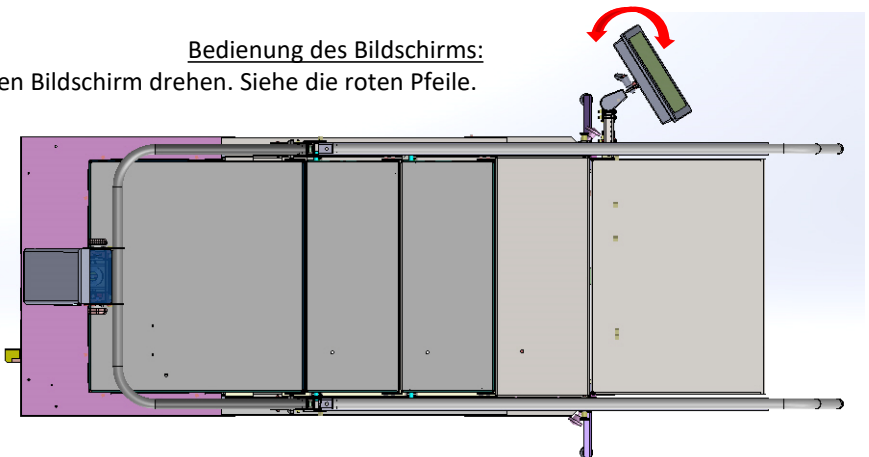


2. Ändern Sie den Winkel des Bildschirms:

Lösen Sie den Hebel (a) und stellen den Winkel des Bildschirms ein (b). Ziehen Sie den Hebel (a) fest.

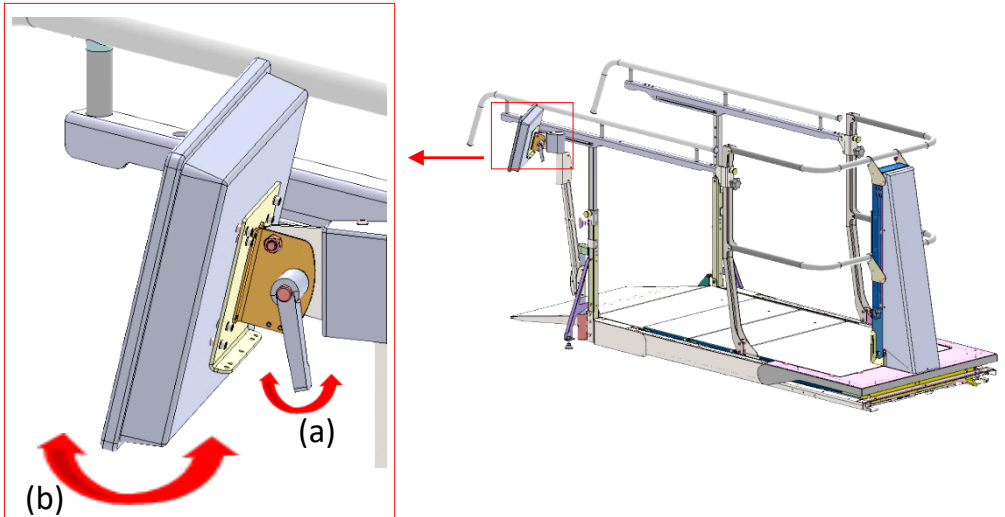

3. Schalten Sie den Bildschirm Ein/Aus:

Der EIN/ (c) befindet sich am unteren Rand des Bildschirms rechts. Drücken Sie einmal auf denSchalter zum **Ein-** oder **Ausschalten**.

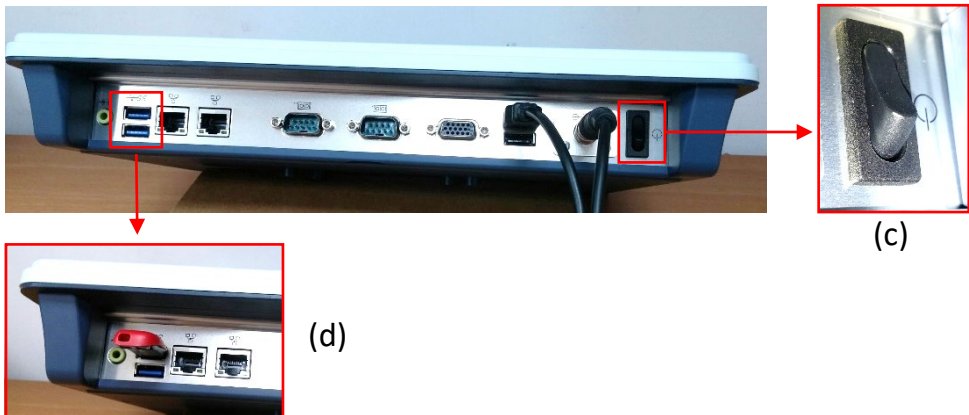


4. Stecken Sie einen USB-Stick (zum Herunterladen der Fortschrittstabellen) ein:

Die Anschlüsse (D/E) zum Einstecken des USB-Sticks befinden sich unten auf dem Bildschirm links (d).


Nutzung der Software:

1. Tastaturbelegung (nicht alle Zeichen erscheinen auf jedem bildschirm):

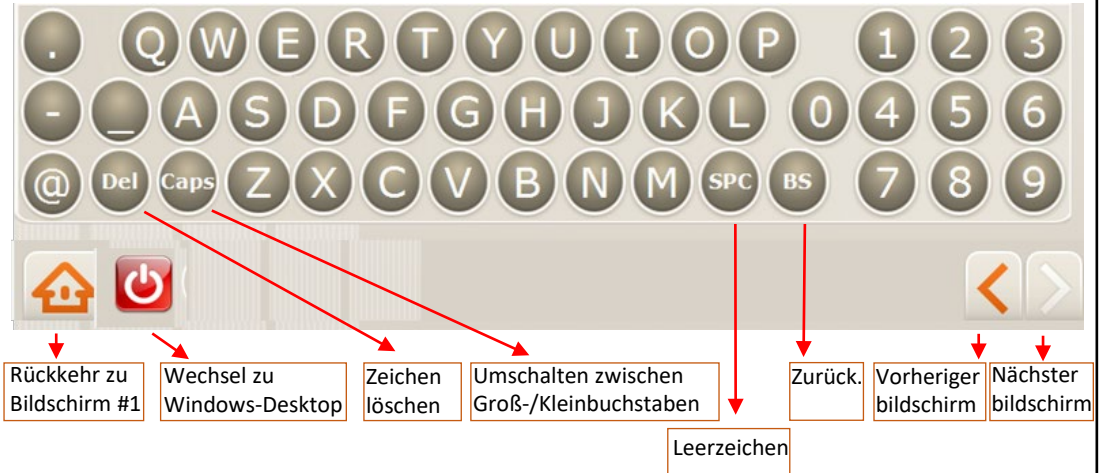

2. Verbinden mit dem WLAN:

Eine WLAN-Verbindung wird zum Senden von Fortschrittstabellen an die vorab eingegebenen E-Mail-Adressen benötigt und ist für den Online-Support erforderlich.

Drücken Sie , um zum Windows-Desktop zu wechseln. Drücken Sie auf das Symbol "Netzwerk und Freigabe ..." und wählen Sie "Verbinden oder Trennen". Wählen Sie Ihre bevorzugte WLAN-Verbindung. Wenn ein Passwort benötigt wird, drücken Sie auf die "Bildschirmtastatur" zur Eingabe des Passwortes. Nach dem Herstellen einer WLAN-Verbindung drücken Sie auf das DST 8000-Pro Symbol, um sich anzumelden. Siehe "Weitere Informationen", wenn keine WLAN-Verbindung verfügbar ist.

3. Erste Schritte:

Wenn Sie zum ersten Mal mit dem **DST 8000-Pro EDV-System** arbeiten, muss der abteilungsleiter der Physiotherapie ("Admin") die Erstinbetriebnahme abschließen. Siehe **Abschnitt A - Die Erstinbetriebnahme und die Admin-Optionen**

Wenn die Ersteinrichtung bereits vom "Admin" abgeschlossen ist, weiter zu **Abschnitt B - Benutzerhandbuch des Physiotherapeuten.**

Siehe: **Benutzerhandbuch**, das sich in der vorderen Tasche an der Hauptkonsole mit den bedienungsanweisungen des DST befindet.

Wichtiger Hinweis: Der Höhsensensor des DST ist sehr empfindlich. Die Zahlen nach dem Komma, welche die Stufenhöhe bei **B-7** angibt, können flimmern. Dies ist normal und hat keine auswirkungen auf den DST oder auf die Leistung der Software.

Abschnitt A - Die Erstinbetriebnahme und die Admin-Optionen

DST8000-PRO
scientific way to keep in step

Log-in

Benutzername:

Passwort:

Copyright © 2015 by DPE Medical - Innovation in Rehabilitation

A-1

- Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein, den Sie mit dieser Broschüre erhalten haben und bestätigen ihn.

Hinweis:

- Bevor Sie das System zum ersten mal benutzen, muss der abteilungsleiter der Physiotherapie ("Admin") die Erstinbetriebnahme abschließen.

Weiter zu **A-2**

DST8000-PRO
scientific way to keep in step

Administrator Optionen

Institutionsdaten bearbeiten

Physiotherapeuten und Patienten bearbeiten

Herunterladen

Passwort ändern

Kalibrierung

A-2

- Drücken Sie: „Institutionsdaten bearbeiten“.

weiter zu **A-3**

DST8000-PRO
scientific way to keep in step

Institutionsdaten

Institutionsname*:

E-Mails:

Adresse*:

Leitender Physiotherapeut*:

Die Einheiten werden angezeigt: Zentimeter Zoll

A-3

- Geben Sie die Institutsdatenein und bestätigen diese.

Hinweis:

- Das markierte Feld (*) muss ausgefüllt werden.
- Die Fortschrittstabelle des Patienten wird an diese E-Mail-Adressen gesendet.
- Wählen Sie die Einheiten zum Anzeigen der Treppenhöhe in der Fortschrittstabelle (Zentimeter/Zoll)
- Die Daten können jederzeit bearbeitet werden. (weiter zu **A-4**)

Abschnitt A - Die Erstinbetriebnahme und die Admin-Optionen



A-4

- Drücken Sie: "Physiotherapeuten und Patienten bearbeiten".

weiter zu **A-5**



A-5

- Bei der Erstinbetriebnahme müssen Sie die Namen der Physiotherapeuten, die Zugang zu dem System haben sollen, eingeben. Drücken Sie "Physiotherapeut hinzufügen" und weiter zu **A-6**.

- Zusätzliche Optionen sind für den Admin auf diesem Bildschirm verfügbar. Detaillierte Informationen finden sie unter **A-8**



A-6

- Geben Sie die Physiotherapeuten ein, die Zugriff auf das System haben sollen, und weisen ihnen einen Benutzernamen und ein Passwort zu. Drücken Sie

Hinweis:

- Wenn Sie die Patienten behandeln, fügen Sie sich selbst als Physiotherapeut mit neuen Zugangsdaten hinzu.
- Die Daten können jederzeit bearbeitet werden.
- Informieren Sie Ihre Kollegen über ihren Benutzernamen und Passwort.
- Das Passwort enthält 4 Ziffern.


Weiter zu **A7**



A-7

☐ You have completed the initial setup and the system is ready for physiotherapists to start sessions.

Now you can:

- press  to end. See- **B-1**
- Insert a disk-on-key and press "Download" to download Progress Chart See **A-9**
- Press "Change password" to change your login info. See **A-10**
- For Calibration option, See **A-11**

A-8

See screen display at A-5

☐ Weitere Admin-Optionen:

- Zum Ändern des Physiotherapeuten des Patienten:
Ziehen & Ablegen des Patientennamens von einem Physiotherapeuten zu einem anderen.
- Zum Anzeigen der Fortschrittstabelle des Patienten:
Tippen Sie zweimal auf den Patientennamen.
- Zum Ändern des Physiotherapeutenamens:
Tippen Sie zweimal auf den Physiotherapeutenamen und geben Änderung ein.
- Zum Ändern des Benutzernamens des Physiotherapeuten:
Tippen Sie zweimal auf den Benutzernamen des Physiotherapeuten und geben Änderung ein.
- Zum Ändern des Passwortes des Physiotherapeuten:
Tippen Sie zweimal auf das Passwort des Physiotherapeuten und geben Änderung ein.
- Zum Löschen des Physiotherapeuten:
Weisen Sie Ihre Patienten anderen Physiotherapeuten neu zu (siehe oben unter "Zum Ändern des Physiotherapeuten des Patienten"), dann drücken Sie "Löschen des Physiotherapeuten". Eine Liste der Physiotherapeuten wird geöffnet. Wählen Sie den Namen des Physiotherapeuten zum Löschen und bestätigen diesen. Wenn dieser Physiotherapeut Patienten hat, und Sie diese nicht vorher neu zugewiesen haben, werden Sie jetzt aufgefordert, dies zu tun.
- Denken Sie daran: Fügen Sie sich selbst als Physiotherapeut hinzu, wenn Sie Patienten behandeln möchten oder die Fortschrittstabellen für den Druck versenden möchten.
- Es wird empfohlen, vorab eine Liste der Physiotherapeuten, ihre Benutzernamen und 4-ziffrigen Passwörter anzulegen, bevor Sie diese unter **A-5** eingeben.
- Wenn Sie das System eine geraume Zeit verwendet haben und Sie Fragen, Ideen oder Wünsche haben, können Sie uns unter info@dpemed.com kontaktieren.

Abschnitt A - Die Erstinbetriebnahme und die Admin-Optionen



A-9

- Herunterladen im Gange
Zum Herunterladen der Fortschrittstabelle des Patienten drücken Sie "Download", wählen das entsprechende Laufwerk (D oder E) und bestätigen dieses.

Hinweis:

- Eine neue Bibliothek namens **Fortschrittstabellen** werden auf Ihrem USB-Stick erstellt und alle Fortschrittstabellen werden dort gespeichert.



A-10

- Zum Ändern der Anmeldedaten des Admin:
Geben Sie ein neues Passwort ein und bestätigen dieses.

Hinweis:

- Stellen Sie sicher, dass Sie sich an Ihre neue Anmeldedaten erinnern.
- Siehe "Support", wenn Sie Ihre Anmeldedaten vergessen haben.



A-11

- Kalibrierungsoption - drücken Sie Kalibrierung und weiter zu **A-12**

Hinweis:

- Eine Kalibrierung wird sehr selten benötigt.
- Die Notwendigkeit einer Kalibrierung kann nach dem Verschieben des **DST** oder des Services auftreten.
- Wenn die Treppenhöhe wie in der Fortschrittstabelle gezeigt, von der angezeigten Höhe im vorderen Fenster oder ungerade abweicht, dann kann eine Kalibrierung erforderlich sein.
- Haben Sie Zweifel? Siehe "Support"

9

Abschnitt A - Die Erstinbetriebnahme und die Admin-Optionen



A-12

- Senken Sie den DST in die flache Position und drücken Sie die Taste wie angewiesen.

Weiter zu **A-13**



A-13


- Heben Sie den DST in die oberste Position und drücken Sie die Taste wie angewiesen.

Weiter zu **A-14**



A-14

- Klicken Sie auf 'OK'.

Weiter zu **A-7** oder drücken Sie  und Weiter zu **B-1**

Section B - Physiotherapist User Guide

DST8000-PRO
scientific way to keep in step

Log-in

Benutzername:

Passwort:

Copyright © 2015 by DPE Medical - Innovation in Rehabilitation

B-1

- Geben Sie den erhaltenen Benutzernamen und Passwort ein, die Sie von Ihrem Administrator erhalten haben, und drücken Sie

Weiter zu **B-2**

DST8000-PRO
scientific way to keep in step

Patient

Wählen Sie einen Patienten

Patienten hinzufügen

B-2

- Press “Add a patient ” to add a new patient and continue to **B-3**

Or

- Press “Choose a patient” for an existing patient and continue to **B-5**

DST8000-PRO
scientific way to keep in step

Patient

Patienten-ID:

Vorname:

Nachname:

Pathologie: other

Geschlecht: Male

Geburtsdag (TT/MM/JJJJ):

Eintrittsdatum (TT/MM/JJJJ): 19 05 2016

B-3


- Zum Hinzufügen eines neuen Patienten:
Geben Sie die Patientendaten ein und drücken Sie


Weiter zu **B-4**

Section B - Physiotherapist User Guide



- Drücken Sie die Taste "Wählen Sie einen Patienten" für einen bestehenden Patienten und weiter zu **B-5**

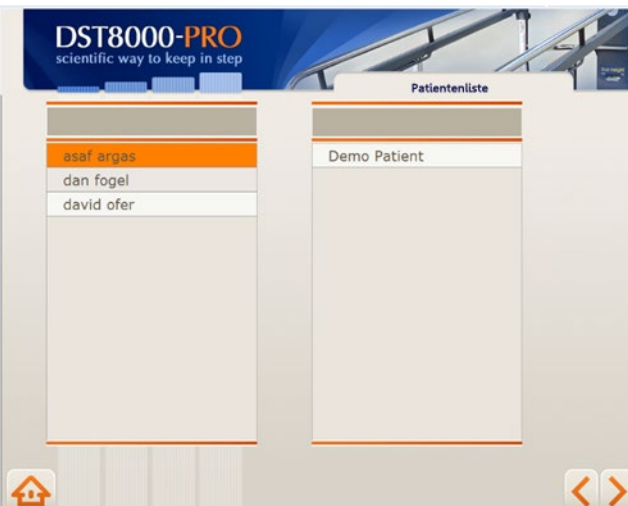


- Wählen Sie einen Patienten, indem Sie auf seinen/ihren Name drücken und drücken dann  Hinweis:
- Für Ihre Bequemlichkeit wird eine Liste Ihrer Patienten links angezeigt sowie eine allgemeine Liste.
 - Die Namen werden in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet.
 - Sie können nach oben/unten blättern oder geben den Patientennamen in das obere leere Feld ein.
- Weiter zu **B-6**



- Drücken Sie die Taste für die gewünschte Option.
- Hinweis:
- Wenn Sie die Option "Neue Sitzung starten" wählen, weiter zu **B-7**
 - Wenn Sie die Option "Patientendaten bearbeiten" wählen, weiter zu **B-8**
 - Wenn Sie die Option "Patientendaten löschen" wählen, weiter zu **B-9**

Erste Behandlung des Patienten - Fortschrittstabelle ist leer

B-7

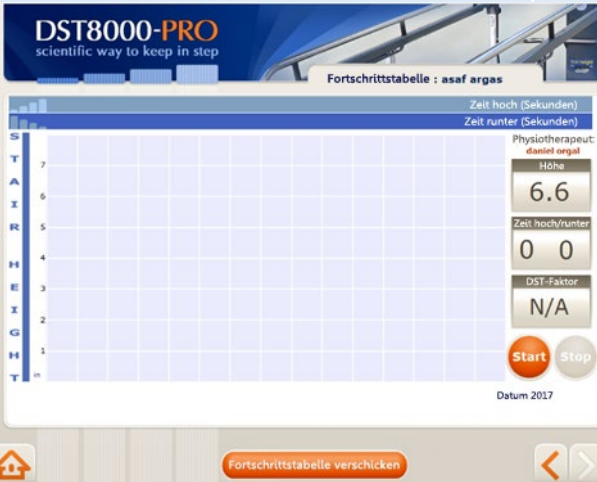

- Die Fortschrittstabelle wird angezeigt.
- Wenn die vorhergehenden Behandlungen verfügbar sind, werden sie auf der Tabelle angezeigt.

- Wenn dies die erste Behandlung ist, wird die Tabelle leer sein.
- Zum Dokumentieren einer Behandlungssitzung: Drücken Sie auf das rote Symbol "Start" bevor der Patient auf die erste Stufe steigt.
- Nachdem der Patient die Treppe hoch und runterläuft, wird seine/ihre Leistung in der Fortschrittstabelle angezeigt.
- Sie müssen die Taste "Start" drücken, wenn Sie die Behandlung aufzeichnen möchten.

Die Fortschrittstabelle des Patienten Chart nach mehreren Behandlungen



- Drücken Sie wenn Sie eine Patientenbehandlung beenden und den Gebrauch des DST beenden möchten.
- Drücken Sie wenn Sie eine Patientenbehandlung beenden und mit der DST mit einem neuen Patienten arbeiten möchten.
- Drücken Sie die Taste "Stopp", wenn der Patient nicht vollständig nach oben/unten gegangen ist.
- Um die Tabelle per E-Mail zum Drucken zu senden, drücken Sie auf "Fortschrittstabelle senden".
- Detaillierte Informationen über die Tabelle finden Sie auf Seite 10.



B-8

Bearbeiten der Patientendaten, und drücken Sie



- Löschen eines Patienten aus dem System löscht die Patientendaten, aber nicht seine/ihre Fortschrittstabelle.

Notizen: _____

Anzeige der Fortschrittstabelle

Zeit, die der Patient benötigte die Treppe in den vergangenen Behandlungen hinaufzusteigen

Zeit, die der Patient benötigte die Treppe in den vergangenen Behandlungen hinunterzusteigen

DST Treppenhöhe

Physiotherapeutenname

Patientenname:

DST8000-PRO
scientific way to keep in step

Fortschrittstabelle: Yval Madir

	Zeit hoch (Sekunden)	Zeit runter (Sekunden)
3	3	3
3	1	2

Physiotherapeut: Victor Korovkin

Höhe: 4

Zeit hoch/runter: 0 0

DST-Faktor: N/A

Start Stop

(TT/MM) Datum 2017

Fortschrittstabelle verschicken

Behandlungsdatum

Fortschrittstabelle

Zurück zum Bildschirm #1

Die Treppenhöhe, die der Patient in einer bestimmten Sitzung stieg.

Zurück zur Patientenliste

Stopp/Starttasten

DST-Faktor

Die Zeit, die der Patient in diesen Behandlungen zum Hinauf/Hinuntersteigen benötigte.

Die gemailte/gedruckte Fortschrittstabelle

(Ihre Tabelle kann abweichen, je nach Ihrer Version)

Die Zeit, die der Patient in den vergangenen Behandlungen zum Hinauf/Hinuntersteigen benötigte.



Hinweis:

- Das Obige ist ein Beispiel einer persönlichen Fortschrittstabelle, wie er im System gespeichert und
- an die angegebenen E-Mail-Adressen durch den Admin bei der Erstinbetriebnahme eingegeben gesendet werden.
- Die Fortschrittstabelle kann direkt vom Computer auf einen USB-Stick heruntergeladen werden.
- Die Fortschrittstabelle ist eine PDF-Datei und kann einfach ausgedruckt werden.
- Es ist wichtig, die ärztliche Schweigepflicht zu wahren, wie es in Ihrem Unternehmen üblich ist.

Zusätzliche Informationen:

1. Wenn der Computer mit dem WLAN verbunden ist, wird eine Fortschrittstabelle an die angegebene E-Mail-Adresse gesendet, jedes Mal wenn Sie auf "Fortschrittstabelle senden" auf dem Bildschirm **B-7** drücken.
2. Wir empfehlen, nur die festgelegten E-Mail-Adressen zum Empfang von Informationen aus dem DST 8000-Pro System zu benutzen.
3. Der Name der PDF-Datei, die die Fortschrittstabelle enthält, umfasst den Patientennamen und eine Seriennummer.
4. Eine Fortschrittstabelle wird erstellt und gespeichert, wenn Sie "Start" auf dem Bildschirm **B-7** drücken.
5. Die Patientendaten, die vom **DST** generiert werden, sind vertraulich. Handeln Sie nach eigenem Ermessen und befolgen Sie die Organisationsmaßnahmen zur Wahrung der Vertraulichkeit von Patientendaten und Dokumenten.
6. Das Verwenden der **DST 8000-Pro** Software liegt in der alleinigen Verantwortung des Benutzers.
7. Wenn der Admin das Passwort/Benutzernamen verlieren, wenden Sie sich bitte an DPE Medical: info@dpemed.com für neue Anmeldedaten
8. Das Ziel des DST-Faktors ist einen Parameter zur Verfügung zu stellen, der die derzeitige Treppensteigfähigkeit des Patienten zeigt, jedoch setzt es nicht Ihr professionelles Urteil außer Kraft oder ersetzt es.
9. Wenn die WLAN-Verbindung nicht verfügbar ist, können Sie den Computer mit dem Netzwerk mithilfe eines Internetkabels oder eines Netsticks verbinden. Konsultieren Sie Ihren Netzwerktechniker.
10. Sie können immer die Fortschrittstabellen auf einen USB-Stick herunterladen. Siehe **A-9**.
11. Das DST kann ohne die Software verwendet werden.
12. Schalten Sie nicht den Computer aus.
13. Kleine optische Abweichungen können zwischen diesem Handbuch und der Anzeige auf dem Bildschirm bestehen.
14. Es wird empfohlen, dass die Physiotherapeuten die Patientendaten im System vor und nicht während der Behandlung eingeben.
15. Denken Sie daran: Am Bildschirm **B-7** müssen Sie "Start" drücken, bevor der Patient auf die Treppe #1 steigt, um die Behandlung aufzuzeichnen. Sie müssen auf die Taste "Fortschrittstabelle senden" drücken, damit Ihnen die Tabelle per E-Mail zugesendet wird.

Support:

1. Wenn Sie ein Problem mit der Software haben, versuchen Sie, den Bildschirm ein- und auszuschalten. Siehe Seite 4.
2. Wenn Sie Ihre Admin Anmeldedaten vergessen haben, kontaktieren Sie uns unter: info@dpemed.com
3. Kalibrierung: Wenn bei **B-7**, 0 (Null) angezeigt wird, wenn der DST komplett unten ist und 16,5 (6.6 Zoll) angezeigt wird, wenn der DST komplett hochgefahren ist, dann ist eine Kalibrierung notwendig.
4. Wenn das Problem weiterhin besteht, senden Sie eine E-Mail an info@dpemed.com mit einer Beschreibung des Problems, Ihrem Namen, Ihrer E-Mail-Adresse, Telefonnummer und dem Namen Ihres Instituts und Adresse. Wir diagnostizieren das Problem und beheben es aus der Ferne und halten Sie auf dem Laufenden.

Eine WLAN-Verbindung ist erforderlich, und der Computer muss eingeschaltet sein.

Der **DST8000-Pro** wurde entwickelt und wird hergestellt von:

DPE Medical Ltd

49 Yefe Nof, Shoeva 9085500, Israel

Tel: +972-2-5791177; Fax: +972-2-5791188

info@dpemed.com ; www.dpemed.com

ISO 9001: 2008 ISO 13485:2003

Zusätzliche Informationen:

1. Wenn der Computer mit dem WLAN verbunden ist, wird eine Fortschrittstabelle an die angegebene E-Mail-Adresse gesendet, jedes Mal wenn Sie auf "Fortschrittstabelle senden" auf dem Bildschirm **B-7** drücken.
2. Wir empfehlen, nur die festgelegten E-Mail-Adressen zum Empfang von Informationen aus dem DST 8000-Pro System zu benutzen.
3. Der Name der PDF-Datei, die die Fortschrittstabelle enthält, umfasst den Patientennamen und eine Seriennummer.
4. Eine Fortschrittstabelle wird erstellt und gespeichert, wenn Sie "Start" auf dem Bildschirm **B-7** drücken.
5. Die Patientendaten, die vom **DST** generiert werden, sind vertraulich. Handeln Sie nach eigenem Ermessen und befolgen Sie die Organisationsmaßnahmen zur Wahrung der Vertraulichkeit von Patientendaten und Dokumenten.
6. Das Verwenden der *DST 8000-Pro* Software liegt in der alleinigen Verantwortung des Benutzers.
7. Wenn der Admin das Passwort/Benutzernamen verlieren, wenden Sie sich bitte an DPE Medical: info@dpemed.com für neue Anmeldedaten
8. Das Ziel des DST-Faktors ist einen Parameter zur Verfügung zu stellen, der die derzeitige Treppensteigfähigkeit des Patienten zeigt, jedoch setzt es nicht Ihr professionelles Urteil außer Kraft oder ersetzt es.
9. Wenn die WLAN-Verbindung nicht verfügbar ist, können Sie den Computer mit dem Netzwerk mithilfe eines Internetkabels oder eines Netsticks verbinden. Konsultieren Sie Ihren Netzwerktechniker.
10. Sie können immer die Fortschrittstabellen auf einen USB-Stick herunterladen. Siehe **A-9**.
11. Das DST kann ohne die Software verwendet werden.
12. Schalten Sie nicht den Computer aus.
13. Kleine optische Abweichungen können zwischen diesem Handbuch und der Anzeige auf dem Bildschirm bestehen.
10. Es wird empfohlen, dass die Physiotherapeuten die Patientendaten im System vor und nicht während der Behandlung eingeben.
15. Denken Sie daran: Am Bildschirm **B-7** müssen Sie "Start" drücken, bevor der Patient auf die Treppe #1 steigt, um die Behandlung aufzuzeichnen. Sie müssen auf die Taste "Fortschrittstabelle senden" drücken, damit Ihnen die Tabelle per E-Mail zugesendet wird.

Support:

1. Wenn Sie ein Problem mit der Software haben, versuchen Sie, den Bildschirm ein- und auszuschalten. Siehe Seite 4.
2. Wenn Sie Ihre Admin Anmeldedaten vergessen haben, kontaktieren Sie uns unter: info@dpemed.com
3. Kalibrierung: Wenn bei **B-7**, 0 (Null) angezeigt wird, wenn der DST komplett unten ist und 16,5 (6.6 Zoll) angezeigt wird, wenn der DST komplett hochgefahren ist, dann ist eine Kalibrierung notwendig.
4. Wenn das Problem weiterhin besteht, senden Sie eine E-Mail an info@dpemed.com mit einer Beschreibung des Problems, Ihrem Namen, Ihrer E-Mail-Adresse, Telefonnummer und dem Namen Ihres Instituts und Adresse. Wir diagnostizieren das Problem und beheben es aus der Ferne und halten Sie auf dem Laufenden. **Eine WLAN-Verbindung ist erforderlich, und der Computer muss eingeschaltet sein.**

Der *DST8000-Pro* urde entwickelt und wird hergestellt von:

DPE Medical Ltd, 49 Yefe Nof, Shoeva 9085500, Israel; Tel: +972-2-5791177; Fax: +972-2-5791188

info@dpemed.com ; www.dpemed.com

ISO 9001: 2008 ISO 13485:2003



DST8000-Pro

Die wissenschaftliche Methode, Schritt zu halten.



■ ■ ■ ■ ■
Innovation In Rehabilitation