


DST Triple Sense

Benutzerhandbuch

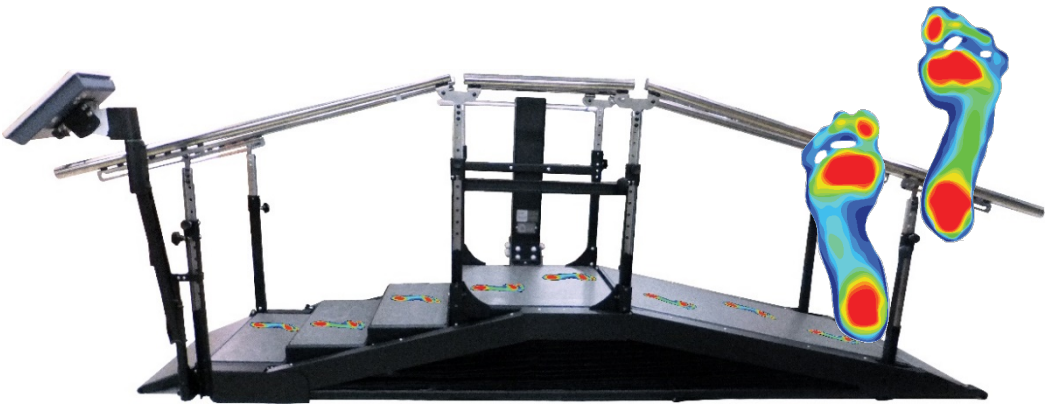

Die wissenschaftliche Art, Schritt zu halten



Achtung! Es darf sich niemand auf dem Gerät aufhalten während die Höhe der Treppe/Rampe eingestellt wird

Erste Anmeldeinformationen für Administratoren

Benutzername: admin

Passwort: Aa123456

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	3
2. Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitshinweise	4
3. Loslegen	5
4. Einstellen des Handlaufs	5
5. Einstellen der Höhe und der Neigung der Treppe	6
6. Die Software verwenden	6
6.1 Einleitung.....	7
6.2 Bildschirmeinstellungen	7
6.3 Bedienung des Bildschirms	7
6.4 Den Winkel des Bildschirms ändern.....	8
6.5 Bildschirm ein-/ausschalten	8
6.6 Einlegen eines Disk-on-key (zum Herunterladen von Daten)	9
6.7 Verwenden der Bildschirmtastatur	9
6.8 Mit WLAN verbinden:.....	9
6.9 Loslegen:	10
6.10 Abschnitt A - Ersteinrichtung und Verwaltungsoptionen	11
6.10 Abschnitt B - Optionen für Physiotherapeuten.....	14
7. Zusätzliche Informationen:	19
8. Unterstützung:	20
9. Fehlerbehebung	20
10. Technische Spezifikationen	21

1. Einleitung

Liebe Physiotherapeuten,

Treppensteigen und Gehen auf geneigten Flächen sind grundlegende Alltagsfähigkeiten, die für die Unabhängigkeit notwendig sind. Je schneller die Patienten diese Fähigkeiten wiedererlangen, desto schneller können sie in ihr normales Leben zurückkehren.

Das DST Triple Sense kombiniert alle drei obligatorischen Gangfunktionen - Gehen auf ebener Fläche, Treppensteigen und Überwinden von Schrägen - mit der fortschrittlichsten Ganganalysetechnik und bietet so eine umfassende, evidenzbasierte Behandlung. Es hilft bei der Diagnose, Behandlung und Untersuchung der ambulanten Fähigkeiten von Patienten in der neurologischen, orthopädischen und geriatrischen Rehabilitation.

Mit nur einem Knopfdruck können Sie den Grad der Steigung und die Höhe der Treppe einstellen. Die Patienten profitieren von einem optimalen Trainingsprogramm, das zu einer verbesserten Leistung in kürzerer Zeit und mit weniger Aufwand führt.

DST Triple Sense verfügt über eine benutzerfreundliche Software und Benutzeroberfläche zur Verwaltung und Überwachung der Behandlungen. Es zeigt die Daten früherer Sitzungen an, so dass der Fortschritt des Patienten leicht verfolgt werden kann.

Klare und objektive Fortschrittsdiagramme können schnell für alle Trainingsparameter erstellt werden. Die Daten der Behandlungen können heruntergeladen oder per E-Mail versendet werden.

Vielen Dank, dass Sie sich entschieden haben, das DST Triple Sense in Ihre Klinik und Ihr Rehabilitationsprogramm zu integrieren. Wir sind sicher, dass es Ihnen helfen wird, eine qualitativ hochwertige und erfolgreiche Patientenbetreuung zu gewährleisten.

2. Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitshinweise

- Das *DST* darf nur unter der Aufsicht eines autorisierten Physiotherapeuten verwendet werden.
- Seien Sie besonders vorsichtig, wenn sich Kinder in der Nähe befinden.
- Stellen Sie das *DST* nicht in der Nähe von Fenstern auf, die die Bewegung des Geräts beeinträchtigen könnten.
- Höhe der Decke: Stellen Sie sicher, dass der Kopf des Patienten die Decke nicht erreicht, wenn er auf der obersten Stufe steht, wenn das *DST* vollständig angehoben ist.
- Setzen Sie das *DST* nicht Regen oder Feuchtigkeit aus.
- Verwenden Sie das *DST* nicht an Orten, an denen Wasser verschüttet werden kann.
- Verwenden Sie das *DST* nicht, wenn Sie oder der Patient nass sind.
- Stellen Sie das *DST* nicht in der Nähe einer Wärmequelle auf.
- Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände auf dem Netzkabel liegen und lassen Sie keine Kabel dort hängen, wo sich Personen häufig aufhalten.
- Vergewissern Sie sich vor dem Betrieb des *DST*, dass keine Gegenstände oder Personen die vertikale Bewegung des Geräts behindern.
- Während der Einstellung der Treppen-/Rampenhöhe sollte sich niemand auf dem Gerät aufhalten.
- Ziehen Sie den Netzstecker des *DST*, bevor Sie es reinigen.
- Versuchen Sie nicht, das *DST* selbst zu warten. Wenn das *DST* nicht funktioniert, lesen Sie bitte in Abschnitt 8 nach.
- Ziehen Sie den Netzstecker des *DST* und wenden Sie sich an Ihren autorisierten Vertreter, wenn einer oder mehrere der folgenden Fälle auftreten: Das Netzkabel oder der Stecker ist beschädigt; das *DST* ist mit Wasser in Berührung gekommen; das *DST* wurde beschädigt; das *DST* funktioniert nicht normal; es sind ungewöhnliche Geräusche zu hören.

3. Loslegen

3.1 Lassen Sie sich von Ihrem technischen Team bestätigen, dass das DST Triple Sense ordnungsgemäß installiert und einsatzbereit ist.

3.2 Überprüfen Sie vor jedem Einsatz die Umgebung des DST, um sicherzustellen, dass sich keine Hindernisse in der Nähe befinden, die die Bewegung des DST beeinträchtigen könnten.

3.3 An das DST dürfen keine externen Geräte, Gummibänder, Seile usw. angeschlossen oder gebunden werden.


3.4 Vergewissern Sie sich vor dem Training mit einem Patienten, dass sich die Handläufe in der richtigen Höhe befinden.

4. Einstellen des Handlaufs

4.1 Vergewissern Sie sich, dass sich das DST in einer horizontalen Position befindet (siehe Abschnitt 5).

4.2 Jeder Handlauf (links oder rechts) wird von vier Säulen getragen (siehe Zeichnung unten). Um die Höhe zu verändern, verstellen Sie jede Säule jeweils um einige Zentimeter/Zoll.

4.3 (1) Lösen Sie den Feststellknopf, (2) halten Sie den Handlauf, (3) ziehen Sie den Federstößel, (4) und heben oder senken Sie den Handlauf. Setzen Sie den Federstößel in das neue Positionierungsloch ein und ziehen Sie den Knopf wieder fest. Wiederholen Sie diesen Schritt für jede Säule

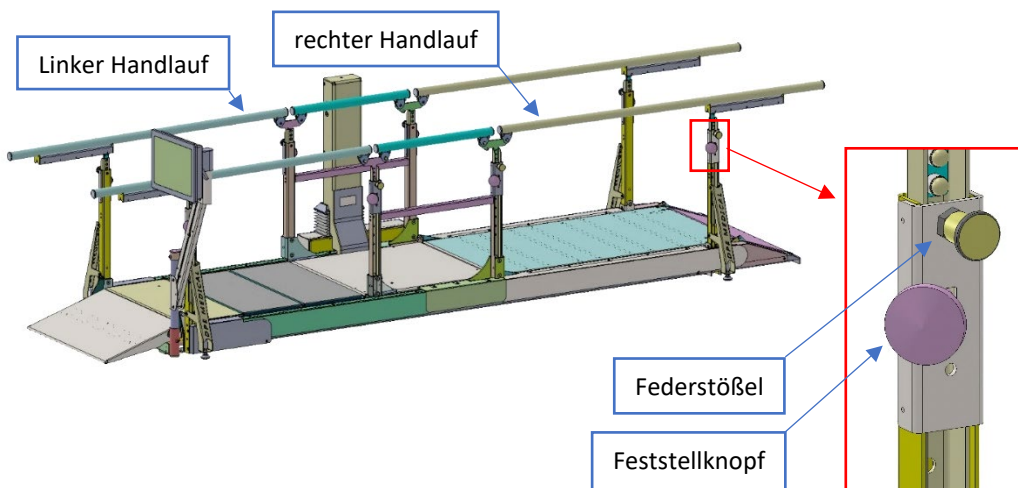

5. Einstellen der Höhe und der Neigung der Treppe

5.1 Halten Sie die Auf-/Ab-Tasten auf der Handsteuerung gedrückt, bis die gewünschte Treppenhöhe oder der gewünschte Rampenwinkel erreicht ist.

5.2 Überwachen Sie die Höhe der Treppe oder den Neigungswinkel, indem Sie die Skala auf der mittleren Säule beobachten (Zentimeter stehen links, während Zoll rechts steht).

Die maximale Treppenhöhe beträgt 16,5 Zentimeter (6,5 Zoll) und der maximale Neigungswinkel 26 Grad. Sie können die Änderungen auch auf Ihrem Bildschirm verfolgen, wenn die Software verwendet wird.



6. Die Software verwenden

6.1 Einleitung

Die DST Triple Sense-Software erfasst und analysiert die Gangleistung des Patienten auf Treppen, Schrägen und parallelen Stangen. Zu den aufgezeichneten Daten gehören: Treppennutzung - Höhe und Zeit des Auf- und Abstiegs; Hangnutzung - Grad und Zeit des Auf- und Abstiegs; Parallelbarren - 3-Meter-Gehzeit; rechte/linke Gewichtsverteilung; vordere/ hintere Fußverteilung; Schrittzeit; Schrittlänge; Schwerpunkt; Fußwinkel.


Mit einem Mausklick wird ein Fortschrittsdiagramm des Patienten erstellt und angezeigt, einschließlich aller Daten der vergangenen Sitzungen. Das Fortschrittsdiagramm kann per E-Mail an das medizinische Personal zur Überprüfung und Bewertung gesendet werden.

6.2 Bildschirmeinstellungen

Nach 20 Minuten ohne Benutzung wird die Anzeige ausgeblendet und der Satz: **Tippen Sie zum Starten** auf dem Bildschirm. Die Software schaltet sich nach 5 Stunden ohne Nutzung automatisch ab.


6.3 Bedienung des Bildschirms

Sie können den Bildschirm drehen. Siehe die roten Pfeile.

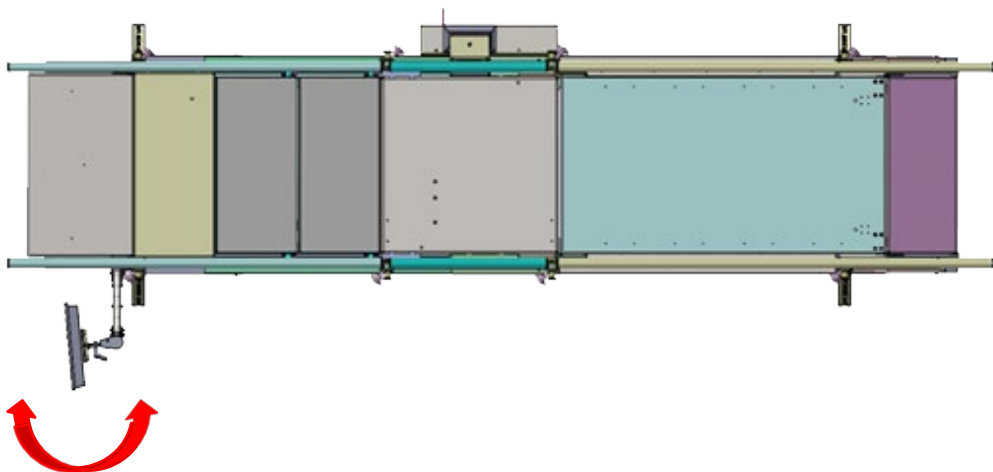


6.4 Den Winkel des Bildschirms ändern

Lösen Sie den Hebel (a) und stellen Sie den Winkel des Bildschirms ein (b). Ziehen Sie den Hebel fest

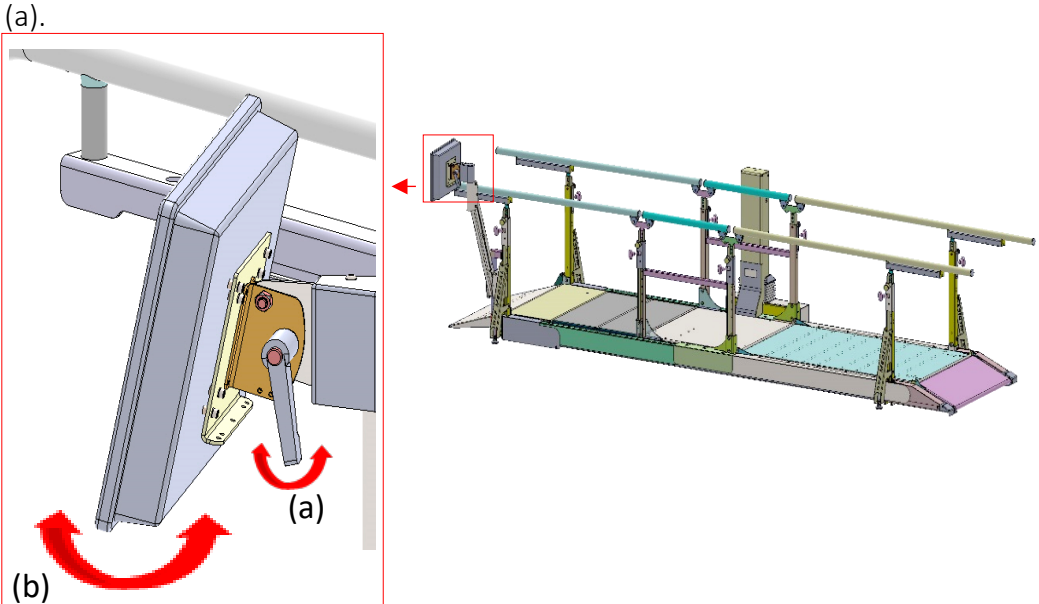

6.5 Bildschirm ein-/auschalten


Der Ein/Aus-Schalter (c) befindet sich unten rechts auf dem Bildschirm. Drücken Sie einmal auf den Schalter, um den Bildschirm ein- oder auszuschalten.

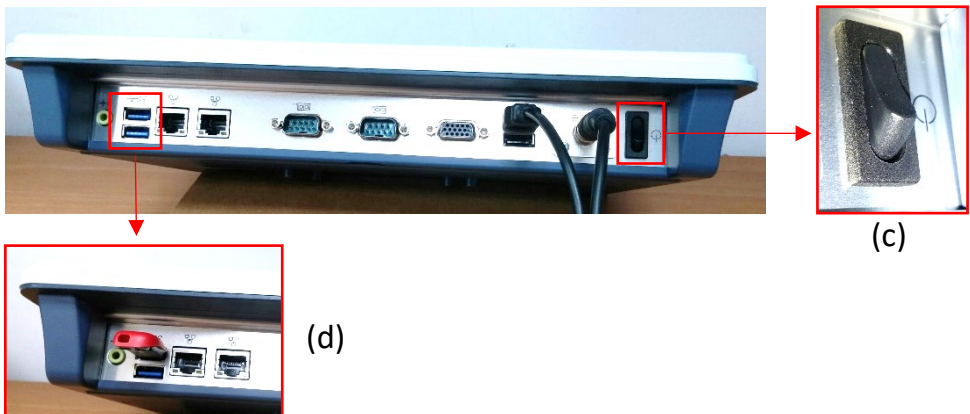

6.6 Einlegen eines Disk-on-key (zum Herunterladen von Daten)

Die Anschlüsse (D/E) zum Einfügen von DoK befinden sich am unteren Rand des Bildschirms auf der linken Seite (d).

6.7 Verwenden der Bildschirmtastatur

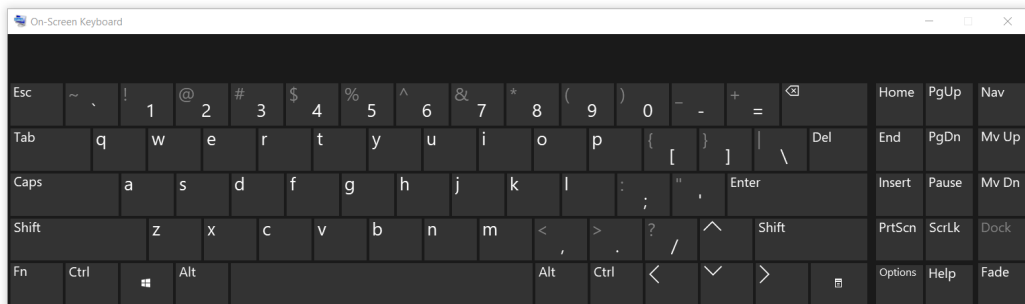

6.8 Mit WLAN verbinden:

Eine WLAN-Verbindung ist erforderlich, um Daten außerhalb des Systems zu senden, und ist für den Online-Support unerlässlich. Beenden Sie die Software auf dem Windows-Desktop. Drücken Sie auf das Symbol "Netzwerk und Freigabe..." und wählen Sie "Verbinden oder Trennen". Wählen Sie Ihre bevorzugte WLAN-Verbindung. Wenn ein Kennwort erforderlich ist, drücken Sie auf "Bildschirmtastatur", um ein Kennwort einzugeben. Nachdem Sie eine WLAN-Verbindung hergestellt haben, drücken Sie auf das DST Sense-Symbol, um sich anzumelden.

Siehe "Weitere Informationen", wenn keine WLAN-Verbindung verfügbar ist.

6.9 Loslegen:

Die erste Anmeldung und Ersteinrichtung sollte vom Administrator (z. B. dem Abteilungsleiter) vorgenommen werden. Siehe Abschnitt A - Ersteinrichtung und Verwaltungsoptionen.

Wenn die Ersteinrichtung bereits durch den "Administrator" erfolgt ist, fahren Sie fort mit Abschnitt B - Benutzerhandbuch für Physiotherapeuten.

Wichtig: Da der Hörsensor des DST sehr empfindlich ist, können die Zahlen hinter dem Dezimalpunkt flackern. Dies ist normal und hat keinen Einfluss auf das DST oder die Softwareleistung.

6.10 Abschnitt A - Ersteinrichtung und Verwaltungsoptionen

A-1 Anmeldung



Geben Sie die ersten Anmeldeinformationen für den Administrator ein. Hinweis:

- Vor der ersten Benutzung des Systems muss der Administrator (z. B. der Abteilungsleiter) die unten dargestellte Ersteinrichtung vornehmen.

A-2 Admin Homepage



Muss bei der Ersteinrichtung ausgefüllt werden:

- **Den Nutzungsbedingungen zustimmen**
- **Passwort ändern**
- **A-3 Informationen über das Institut.**
- **A-5 Systemstatus**

Andere Optionen:

- **A-4 Verwaltung von Physiotherapeuten**
- **B-2 Verwalten von Patienten**
- **B-3 Praxis Patient**

A-3 Informationen zum Institut

The screenshot shows a form titled "Institution Information" with the following fields and sections:

- Institution Name:** A text input field.
- Address:** A section containing four text input fields for "Street Address", "City", "Postal / Zip code", and "Country".
- Device ID/No.:** A text input field.
- Installation Date:** A date selection field.
- Person Of Contact:** A section containing four text input fields for "Last Name", "First Name", "Email", and "Phone".
- Right State:** A section with two radio buttons labeled "Left" and "Right", and two buttons labeled "Back" and "Continue".

At the bottom of the form, there is a logo for "DFE" (Innovation in Rehabilitation) and two buttons labeled "Submit" and "Edit".

- Geben Sie die Informationen des Instituts und die Daten des Geräts ein.
- Wählen Sie die Maßeinheiten (cm/Zoll).
- Die Daten können jederzeit bearbeitet werden.

A-4 Verwalten von Physiotherapeuten

The screenshot shows a form titled "Manage Physiotherapists" with the following elements:

- A header "Manage Physiotherapists" and a sub-header "Select Physiotherapist, or: **Add new**".
- A large blue rectangular area labeled "Physio Therapists" which is currently empty.
- Below this area are three text input fields labeled "First name:", "Last name:", and "Username:".
- At the bottom of the form, there is a "Back" button and a row of four buttons (the first is highlighted in blue).

At the bottom of the form, there is a logo for "DFE" (Innovation in Rehabilitation) and two buttons labeled "Switch Back" and "Edit".

- Um einen PT hinzuzufügen, klicken Sie auf "**Add new**" und geben Sie den Namen und den Benutzernamen des PT unten ein. Der Benutzernamen muss eindeutig sein.
- Das System vergibt automatisch ein einheitliches Passwort für alle neuen PTs. Kennwort: Aa123456
- Sie können eine Liste der vorhandenen PTs sehen. Klicken Sie auf einen PT, um seine Informationen anzuzeigen oder seinen Namen und Benutzernamen zu bearbeiten oder sein Passwort neu zu starten.

A-5 Systemstatus

Sensor 9

Sensor 8

Sensor 7

Sensor 6

Sensor 5

Sensor 4

Sensor 3

Sensor 2

Sensor 1

Force sensors

To calibrate the force sensors:

1. If not all the data to the right are full, press detect.
2. To change the position of a force sensor, press on it and select its position.

Detect

Calibrate sensors

System Status

Height sensor

To calibrate the DST height sensor:

1. Lower the DST to the lowest position and press the Low calibrate button.
2. Raise the DST to the highest position and press the High calibrate button.

Stair height: 0 cm **Slope angle: 0 deg**

Low calibrate **High calibrate**

Null

DFE ASSOCIATION Forum der Deutschen Eisenbahnfreunde

Suche... **Go**

- Bei der Eingabe von "**System Status**" prüft das System automatisch alle Funktionen und gibt einen visuellen Hinweis.
- Stellen Sie sicher, dass während der folgenden Schritte nichts auf dem DST ist:
 - **Erzwingen Sie die Verbindung der Sensoren:** In den blauen Feldern (links) sollten die Nummern aller Sensoren erscheinen. Wenn nicht, drücken Sie auf "**detect**". Dadurch werden die Sensoren erneut verbunden. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, versuchen Sie, die USB-Kabel vom Computer zu trennen und wieder anzuschließen.
 - **Erzwingen Sie die Kalibrierung der Sensoren:** Wenn Sie in den blauen Feldern andere Daten als die Sensornummer sehen, z. B. grüne/blau/rote Punkte, drücken Sie auf "**Calibrate sensors**". Vergewissern Sie sich, dass sich nichts auf dem DST befindet. Dieser Vorgang dauert bis zu 10 Sekunden..
 - **Kalibrierung des Höhensensors:** Kalibrieren Sie den Höhensensor, indem Sie den DST auf Null (flache Position) absenken und auf "**Low calibrate**" drücken. Erhöhen Sie dann den DST auf die maximale Position und drücken Sie "**High calibrate**".

6.10 Abschnitt B - Optionen für Physiotherapeuten

B-1 Physiotherapist Homepage




- **Manage patients:** führt Sie zu einer Liste Ihrer Patienten, um deren Daten hinzuzufügen oder zu bearbeiten. **Siehe B-2**
- **Patient Practice:** führt Sie zu einer Liste Ihrer Patienten. Sie können einen Patienten üben oder vergangene Sitzungen ansehen. **Siehe B-3**
- **Quick Start:** führt Sie zur Schnellstartpraxis, in der keine Informationen aufgezeichnet werden. **Siehe B-5.**

B-2 Patienten verwalten




- Um einen Patienten hinzuzufügen, klicken Sie auf **“Add new”**. und geben Sie die Patientendaten unten ein. Im unteren Bereich können Sie den Patienten einem bestimmten Arzt zuweisen.
- Sie können eine Liste aller vorhandenen Patienten sehen. Klicken Sie auf einen Patienten, um seine Daten anzuzeigen oder zu bearbeiten.

B-3 Patienten Praxis

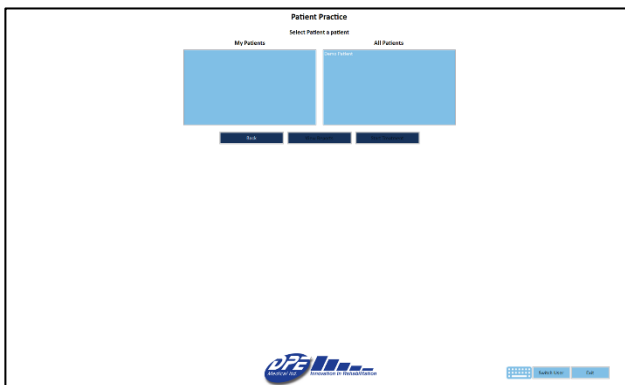

- Auf der linken Seite befindet sich eine Liste aller Ihnen zugewiesenen Patienten. Auf der rechten Seite sehen Sie eine Liste aller Patienten im System.
- Sie können wählen, ob Sie den Patienten üben (**B-6, B-7**) oder vergangene Sitzungen ansehen möchten (**B-4**).


B-4 Vergangene Sessions von Patienten

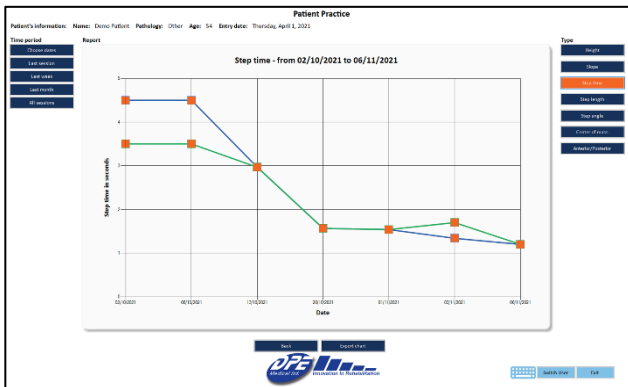

- Um die vergangenen Sitzungen des Patienten zu sehen, wählen Sie den entsprechenden Zeitraum (links) und die Art der Informationen (rechts).
- Die Grafik in der Mitte zeigt die ausgewählten Daten an.
- Sie können Ihre Wahl jederzeit ändern.

- Klicken Sie auf **“Export chart”**, um das aktuelle Diagramm als PDF zu speichern.
- Drücken Sie auf **“Export raw data”**, um alle Sitzungen im csv-Format zu exportieren.
- Wenn Sie auf ein beliebiges orangefarbenes Quadrat drücken, werden die vollständigen Daten dieser Sitzung angezeigt.

B-5 schneller Zugang

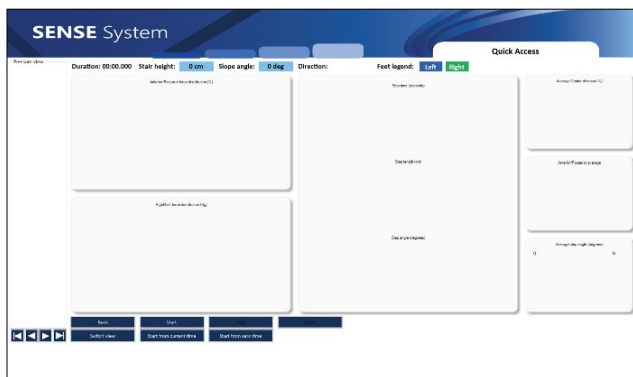

- Die Schnellzugriffsoption wurde entwickelt, um eine schnelle Nutzung des Systems zu ermöglichen, ohne dass ein Patient eingegeben werden muss.
- Die analysierten Parameter sind die gleichen wie in der normalen Praxis.

- Es werden **KEINE DATEN AUFGEZEICHNET**, sie werden nur auf dem Bildschirm angezeigt.
- Vor dem Üben ist eine Behandlungseinstellung erforderlich. **Siehe B-6**

B-6 Behandlungseinstellung

The screenshot shows the SENSE System interface. At the top, it says "SENSE System" and "Demo Patient". Below this, there are three tabs: "Stair height: 0 cm", "Slope angle: 0 deg", and "Feet legend: Left Right". The "Right" tab is selected. Under "Treatment Setup: Feet Dimensions", there are four numbered instructions: 1. Ask the patient to stand still with both feet on the foot plate, on the beginning of the main plate, while facing the CSI. 2. Use the foot pedal's pressure chair foot pedal. 3. Close eyes and parallel with the main plate, arms down. 4. If the display does not represent accurately patient's feet pressure distribution, check patient's feet position, patient's posture, and if the patient loses the balanced assembly. Below these instructions are three sub-points: "Instruct patient", "Instruct user to secure the patient if needed", and "Feet should be straight". There are also "Current threshold view" and "Confirm" buttons. To the right, there is a diagram of the device with labels: "Thrustable", "CSI", and "Beginning of main plate". Below the diagram, it says "Left foot length: 0 cm" and "Right foot length: 0 cm". The "Biofeedback settings" section has two tabs: "Min. threshold" and "Max. threshold". Below these are four rows of settings, each with a radio button and a range of values (0 to 100) with left and right arrow buttons: "Foot angle (degree)", "Stop time (sec)", "Stop length (cm)", and "Center of mass (%)". The "None" option is selected. At the bottom, there are "Back", "Confirm", and "Swap feet" buttons. The DFE logo is at the bottom center, and "Search User" and "Exit" buttons are at the bottom right.

- Vor dem Üben muss das System die Maße der Füße des Patienten kalibrieren. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Drücken Sie **“Confirm”**, um die Kalibrierung zu bestätigen und mit der Behandlung zu beginnen.
- Vergewissern Sie sich, dass das System den rechten und linken Fuß richtig erkannt hat. Falls nicht, drücken Sie auf **“Swap feet”**, um sie zu tauschen.
- Wenn Sie die Biofeedback-Funktion nicht verwenden, lassen Sie die Einstellung auf **“None”**.



Der Übungsbildschirm zeigt Informationen zur aktuellen Sitzung an.

Optionen auf diesem Bildschirm:

- Drücken Sie **Start**, um mit der Datenaufzeichnung zu beginnen.
- Drücken Sie **Stop**, um die Datenaufzeichnung zu beenden.
- Drücken Sie **Speichern**, um die aktuellen Behandlungsdaten zu speichern. Bevor Sie auf **Speichern** drücken, spielen Sie die Sitzung von Anfang bis Ende ab.
- **Druckansicht:** Im linken vertikalen Rechteck sehen Sie alle aufgezeichneten Daten. Klicken Sie auf ein beliebiges Element, um die Fußklassifizierung zu ändern (rechts/links) oder um nicht relevante Daten zu löschen.
- Drücken Sie die Symbole für Wiedergabe/Wiedergabe/Schritt zurück/Schritt vor, um die aktuell aufgezeichneten Daten anzuzeigen.
- Wenn sich Elemente in der Druckansicht überschneiden: Spielen Sie bis zum Überschneidungszeitpunkt ab, drücken Sie dann auf **Start ab aktueller Zeit** und einmal auf **Rückwärts**. Jetzt werden nur noch Elemente ab diesem Zeitpunkt angezeigt. Sie können die Elemente bei Bedarf korrigieren und dann **Start von Null** drücken, um die Daten der gesamten Sitzung anzuzeigen.
- Drücken Sie Zurück, um zum vorherigen **Bildschirm zurückzukehren**.
- Drücken Sie **Ansicht wechseln**, um die Druckansicht zu ändern - von grün/blauen Fußanzeigen zu Kraftverteilungsanzeigen.

B-8 Biofeedback - Settings

The screenshot shows the SENSE System software interface. At the top, it says "SENSE System" and "Demo Patient". Below that, there are settings for "Stair height: 0 cm", "Slope angle: 0 deg", and "Feet legend: Left Right". A "Treatment Setup: Feet Dimensions" section contains instructions 1-5 and a "Footprint sensor" section with instructions 1-3. A 3D diagram of a foot on a platform is shown with labels "Foot size", "DIT", and "beginning of main slope". Below the diagram, it says "Left foot length: 0 cm" and "Right foot length: 0 cm". The "Biofeedback settings" section is highlighted with a red box and contains a table of settings:

	Min. threshold	Max threshold
○ Foot angle (degree):	0	0
○ Step time (sec):	0	0
○ Step length (cm):	0	0
○ Center of mass (%):	0	0
* None		

At the bottom of the interface, there are buttons for "Back", "Confirm", "Swap feet", "DPE medical AG", "Innovation in Rehabilitation", "Switch User", and "Exit".

Mit der Biofeedback-Funktion können PTs eine Vielzahl von Bewegungsmustern auswählen, die ihre Patienten üben sollen, und diese mithilfe von Echtzeit-Feedback verbessern.

Ein PT kann beispielsweise entscheiden, sich auf den rechten Fußwinkel zu konzentrieren, und den akzeptablen Bereich (in Grad) einstellen. Wenn der Patient die Herausforderung annimmt und sich innerhalb dieses Bereichs bewegt, ertönt ein positives Signal. Weicht der Patient vom akzeptierten Bereich ab, hört das positive akustische Feedback auf und auf dem Bildschirm erscheint eine rote Markierung.

Sie können nur Biofeedback für die Leistung eines Fußes auf einmal erhalten

- Passen Sie zunächst die Biofeedback-Einstellungen an:
 - Wählen Sie den Parameter, den Sie üben möchten, und legen Sie den zulässigen Bereich fest.
 - Wählen Sie den Fuß, den Sie üben möchten.
 - Wählen Sie, welchen Klang Sie hören möchten - positiv, negativ oder beides.
- Folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Maße der Füße zu kalibrieren.
- Drücken Sie auf "**confirm**" und beginnen Sie die Behandlung.

8. Unterstützung:

1. Wenn ein Problem bei der Verwendung der Software auftritt, versuchen Sie, den Computer aus- und wieder einzuschalten.
2. Wenn der Administrator das Passwort/den Benutzernamen verliert, wenden Sie sich bitte an DPE Medical: info@dpemed.com für neue Anmeldeinformationen.
3. Wenn das Problem weiterhin besteht, senden Sie eine E-Mail an info@dpemed.com mit einer Beschreibung des Problems, Ihrem Namen, Ihrer E-Mail-Adresse, Ihrer Telefonnummer und dem Namen und der Adresse Ihres Instituts. Wir werden das Problem aus der Ferne diagnostizieren und beheben und Sie auf dem Laufenden halten.

Für die Fernunterstützung ist eine WLAN-Verbindung erforderlich und der Computer muss eingeschaltet sein.

9. Fehlerbehebung



Sollte die DST nicht richtig funktionieren, überprüfen Sie dies bitte:

- Das Netzkabel ist in die Steckdose eingesteckt.
- Die Wandsteckdose ist mit Strom versorgt. Prüfen Sie dies, indem Sie ein anderes elektrisches Gerät an die Steckdose anschließen.
- Das DST ist möglicherweise durch Übergewicht überlastet. Befreien Sie das DST von allen Benutzern und versuchen Sie es nach 3 Stunden erneut.

Wenn das DST nach all diesen Versuchen immer noch nicht funktioniert, ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an Ihren autorisierten DST-Vertreter.

10. Technische Spezifikationen

- Flache Gehfläche - 3 m/9.8 ft
- Länge des Handlaufs - 3,6 m/11,8 ft
- Gesamtlänge - 3.6 m/11.8 ft
- Gesamtbreite - 1.6 m/5.2 ft
- Breite der Treppe/des Abhangs - 65 cm/25.6 in
- Höhe der Treppe - 0 bis 16,5 cm/6,5 in
- Neigungswinkelbereich - 0 bis 26 Grad
- Höhenbereich des Handlaufs - 65-93 cm/25.6-36.6 in
- Maximale Belastung - 160 kg/352 lbs.
- Gewicht der Einheit - 320 kg/700 lbs.
- Einhaltung der Vorschriften - IEC 60601-1 3ed, CE, UL (Motor, Steuerung)
- Betriebsintervall - 2 min ein / 18 min aus
- Farbe, Design, technische Daten und Funktionen können variieren
- Elektrische Anforderungen - 100-240V, 50/60Hz

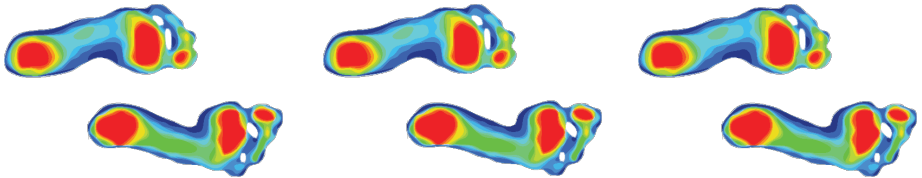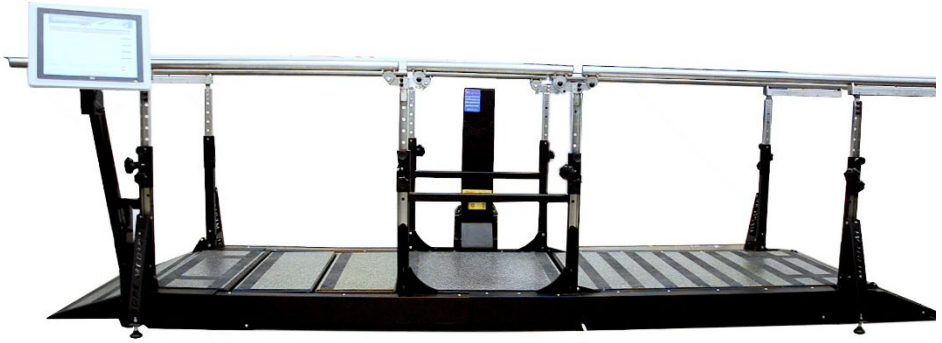

Der DST Triple Sense wurde entwickelt und wird hergestellt von:

DPE Medical Ltd.

49 Yefe Nof, Shoeva 9085500, Israel

Tel: +972-2-5791177; Fax: +972-2-5791188

info@dpemed.com ; www.dpemed.com

